

Bexen cardio
Ready for life



Reanibex 100

Siéntete Cardioprotegido

2 opciones:

- Semiautomático
- Totalmente Automático

Uso en pacientes adultos y
pediátricos


Detección y aviso automático
del cambio del estado de la
batería y los parches

RCP con metrónomo y
retroalimentación en tiempo
real

Configurado según las Guías
ERC/AHA

Reanibex 100

Ready for life

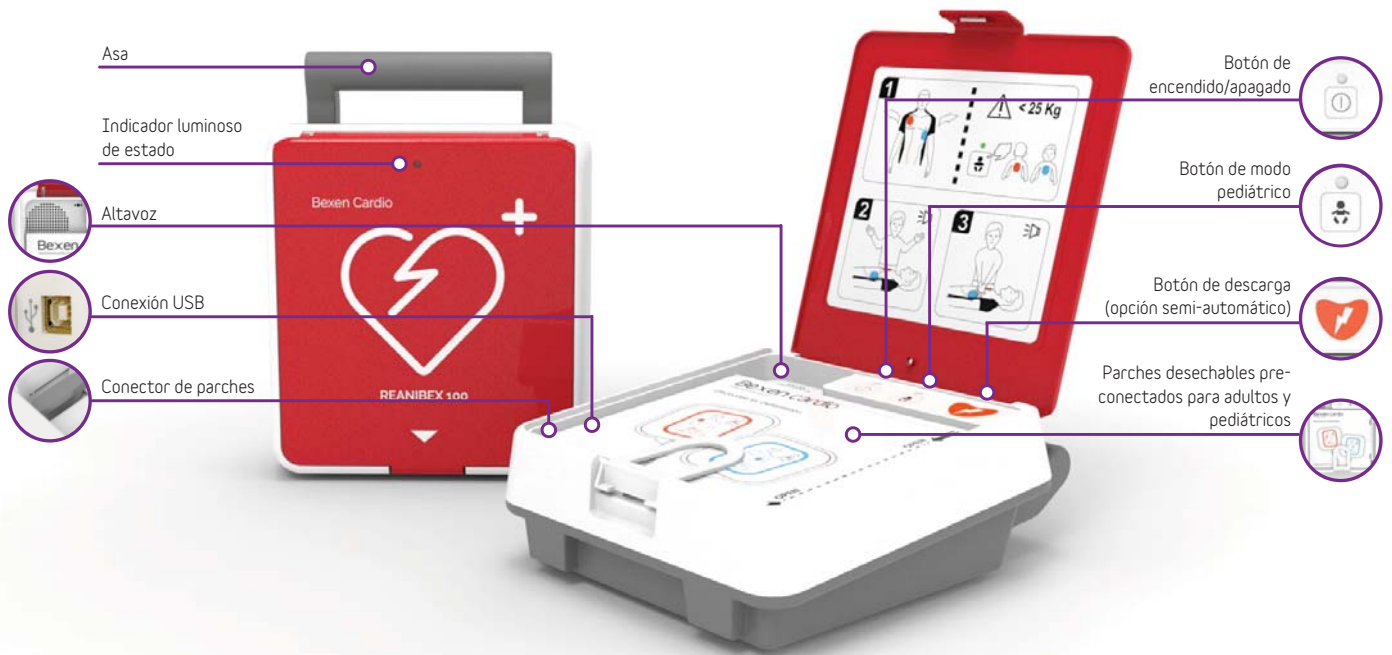

CARACTERÍSTICAS



INSTRUCCIONES CLARAS

Mensajes de audio durante todo el evento para guiar al rescatador. El volumen de los mensajes se adapta al ruido del entorno.



SIEMPRE OPERATIVO

Cuando el LED de estado parpadea indica que el DEA está listo para ser utilizado. Si el equipo detecta un error el LED de estado no se encenderá



OPCIONES DE DESCARGA

En la opción semiautomática, el rescatador deberá pulsar el botón de descarga para suministrarla. En la opción automática, la descarga se suministrará automáticamente.



RÁPIDA DESCARGA

Encendido automático con la apertura de la tapa, parches pre-conectados y precarga para una rápida descarga.



CHEQUEO AUTOMÁTICO

Chequeo diario automático para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y sus accesorios.



AYUDA DURANTE LA RCP

Metronomo y retroalimentación sobre la frecuencia de las compresiones en tiempo real.

APLICACIONES



REANIBEX DATA NET

Aplicación Web para la monitorización continua de tus desfibriladores. Además de la recepción de alertas sobre el cambio del estado de los equipos y sus accesorios, configuración del equipo, actualizaciones de software y visualización de los resultados de los test y episodios, este último opcional.



REANIBEX NFC READER

Aplicación NFC para comprobar el estado del REANIBEX 100 y sus accesorios sin necesidad de conexión PC.. Válido sólo para dispositivos Android.



REANIBEX USB SYNC

Aplicación PC para sincronizar el DEA con el Reanibex Data Net vía USB para configurar el desfibrilador y descargar la información almacenada en el REANIBEX 100.

Bexen cardio

Osatu S. Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com



Rev: 01/2021